

Bedienung Clean Funktion

Für Geräte ab der Seriennummer (SN) **7351** mit **2 Spülprogrammen: 20 Sek. und 2 Min.**



Die **Clean** Funktion dient zum Durchspülen von benutzten Instrumenten nach einer Patienten Behandlung.

Das Durchspülen der Instrumente nach einer Behandlung minimiert das Risiko einer retrograden Kontamination der wasserführenden Systeme durch die Mundflora des Patienten. (Siehe auch RKI Richtlinien).



Der gesamte Spülvorgang muss beaufsichtigt werden, um sofort auf Störungen reagieren zu können und um Schäden wie etwa durch überlaufendes Wasser zu vermeiden.



Ablauf und Vorgehensweise

Beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung des von Ihnen verwendeten Instrumenten-Spüleinsatzes oder Adaptertopfes!

- Das bzw. die BottleSysteme mittels blauem Drehschalter ausschalten
→ Schalterstellung „OFF“
- Tapi und Sieb aus dem Speibecken entfernen¹
- Den Instrumenten-Spüleinsatz in das Speibecken (siehe Abb. 1) einsetzen¹



Abb 1 **Thomas** Instrumenten-Spüleinsatz



Abb 2 **Thomas** Instrumenten-Spüleinsatz mit eingesteckten Instrumenten

- Die Spraytaste (siehe Abb. 3) solange drücken bis ein Quittier Ton ertönt. In der Anzeige erscheint „CLE“ für Clean-Funktion.

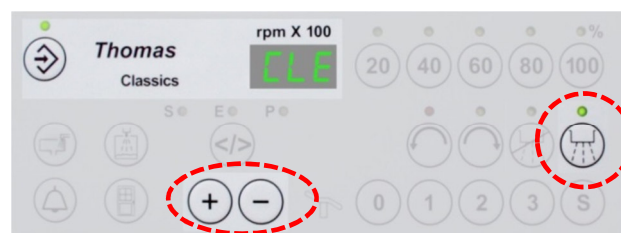


Abb. 3 Folientastatur, Tasten für Clean-Funktion

¹ Gilt nur bei Verwendung des **Thomas** Instrumenten-Spüleinsatzes! ² Gilt nur für **Thomas** Spritzen!

- Alle bzw. die Instrumente die gespült werden sollen, in den Spüleinsatz (siehe Abb.2) oder in den von Ihnen verwendeten Adaptertopf einsetzen. Dazu nehmen sie die Turbine mit Kupplung vom Schlauch, die Kanülen aus den Spritzen, Winkel/Handstücke von den Motoren und das Ultraschall-Handstück vom Schlauch.
- Die Spritzen in den Adapter des Spüleinsatzes einsetzen, dazu den kleinen Pinn vom Adapter in die Kanülen Aufnahme führen und die Spritze leicht gegen den blauen Gummisteg drücken, wodurch sie sich festklemmt²
- Alle anderen Instrumente bzw. Schläuche lediglich von oben bis zum Anschlag einsetzen.
- BottleSystem einschalten →blauen Drehschalter auf Stellung "ON" drehen

Bedienung Clean Funktion

Für Geräte ab der Seriennummer (SN) **7351** mit **2 Spülprogrammen: 20 Sek. und 2 Min.**



Starten der Clean-Funktion

- Durch Drücken der "+" Taste wird der **20 sekundige** Spülvorgang ausgelöst.
- Durch Halten der "+" Taste bis ein doppelter Quittier Ton ertönt, wird der **2 minütige** Spülvorgang ausgelöst.
- Die Vorgänge können durch erneutes Drücken der "+" Taste wiederholt werden.

Beenden der Clean-Funktion

- Durch Drücken der "-" Taste wird die Clean-Funktion verlassen.
- BottleSystem ausschalten →blauer Drehschalter auf Stellung "OFF"
- Nach Beendigung des Vorganges zuerst die Spritzen entnehmen und in die Ablagen zurückstecken.
Danach die anderen Instrumente bzw. Schläuche entnehmen und wegstecken.
- den **Thomas** Spüleinsatz desinfizieren, trocknen und außerhalb des Beckens lagern oder
den verwendeten Adapter-Topf in das Speibecken entleeren, desinfizieren, trocknen und lagern
- zum Abschluss das Speibecken reinigen und desinfizieren



Die **Clean-Funktion** beinhaltet **nicht** die Spülung des Becherfüllers und **nicht** die Schalenspülung!

Diese Funktionen sind bei Bedarf manuell auszuführen.